



Beoogd gebruik en contra-indicaties

Het LouseBuster™ apparaat is bedoeld om luizen en luizeneitjes in het hoofdhaar van volwassenen en kinderen van vier jaar en ouder te doden of te verwijderen. Het dient te worden gebruikt bij personen met ontklit haar of haar dat met een gewone kam uit elkaar gehaald kan worden. Het haar moet schoon, droog en vrij van haarverzorgingsproducten zijn.

Het LouseBuster™-apparaat kan niet worden gebruikt bij personen die: geen temperatuur of pijn kunnen voelen; niet in staat zijn lichamelijk ongemak te kennen te geven; open hoofdwonden, zweren of zichtbare tekenen van een huid- of hoofdhuidaandoening hebben; in de afgelopen 6 maanden een bestralingsbehandeling van het hoofd hebben ondergaan; of schedel- of gezichtsimplantaten hebben.

Let op

Het LouseBuster™ apparaat is zeer effectief voor het doden of verwijderen van hoofdluizen en eitjes. Na de behandeling blijven er echter dode luizen en dode eitjes in het haar achter. Het is ook mogelijk dat er tijdens de behandeling enkele luizen of eitjes zijn overgeslagen. Om cosmetische redenen en om te garanderen dat alle luizen en eitjes zijn verwijderd, raadt Larada Sciences™ de klanten aan om na de behandeling een volledige kambeurt met een fijntandige luizenkam uit te voeren of te laten uitvoeren.

Omdat het apparaat gebruikmaakt van verwarmde lucht, is er een kleine kans dat de hoofdhuid verbrandt, als het apparaat niet volgens de instructies wordt gebruikt.

MardiCare hanteert algemene handelsvoorwaarden welke te downloaden zijn op: www.mardicare.nl

De handelsmerken LouseBuster, LouseBuster Certified Operator, en Larada Sciences zijn het eigendom van Larada Sciences, Inc. www.lousebuster.com