

## LOUSEBUSTER™



**VOORZIEN  
VAN HET EG-  
KEURMERK**

**FDA  
GOEDGEKEURD**

## DE NIEUWE VERZORGINGSNORM VOOR HET BEHANDELEN VAN HOOFDLUIS

### OVER LOUSEBUSTER™

Het LouseBuster™ apparaat zorgt voor een revolutionaire nieuwe manier om hoofdluis te doden zonder gebruik te maken van pesticiden of andere chemicaliën. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het apparaat, dat alleen gebruikmaakt van gecontroleerde warme lucht, een zeer veilige, snelle en uiterst effectieve manier biedt om alle fasen van hoofdluis uit te roeien – ook luizen-eitjes!

### HOE HET WERKT

Het klinisch geteste LouseBuster™ apparaat is bedoeld om luizen en neten in het hoofdhaar van volwassenen en kinderen van vier jaar en ouder te doden of te verwijderen. Het geeft zorgvuldig gecontroleerde verwarmde lucht af direct op droog, klitvrij haar zonder haarverzorgingsproducten, waarbij een lagere temperatuur wordt gebruikt dan de meeste föhns, met een veel hogere stroomtoevoer. Een unieke applicatortip voor eenmalig gebruik, die speciaal is ontwikkeld om dieper dan de isolatielaag van het haar in te werken, wordt gebruikt om het haar iets op te tillen en een luchtstroom recht op de luizen en eitjes te richten, die zich meestal vlakbij de hoofdhuid en haarwortels bevinden. Hierna volgt een specifiek behandelingspatroon van bepaalde tijdsduur om ervoor te zorgen dat alle gebieden van het hoofd worden behandeld. Er wordt bij de behandeling geen gebruikgemaakt van pesticiden of andere chemicaliën, enkel van verwarmde lucht.

Het LouseBuster™ apparaat is zeer effectief omdat het kleine formaat en de vorm van hoofdluizen en hun eitjes het moeilijk voor ze maakt om water vast te houden. Als ze daarom worden blootgesteld aan de juiste hoeveelheid verwarmde lucht op de juiste temperatuur en gedurende de juiste tijd, drogen ze uit en gaan ze dood.

### VOORDELEN

De LouseBuster™ behandeling zorgt voor een veilige, snelle behandeling die uiterst effectief is en niet alleen levende luizen doodt, maar ook hun eitjes, en dit maakt het tot een slimme keuze in het geval van hoofdluis.

### VEILIG

Bijna alle op recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen die vandaag de dag worden verkocht voor de behandeling van hoofdluis bevatten pesticiden of andere chemicaliën, en vele hiervan kunnen als reactie huidirritatie of andere schadelijke bijwerkingen veroorzaken. Het LouseBuster™ apparaat daarentegen gebruikt alleen gecontroleerde verwarmde lucht, dus het is erg veilig - zelfs als het wordt gebruikt voor de behandeling van mensen met astma en mensen die eerder last kregen van bijwerkingen van andere producten voor de behandeling van hoofdluis.

Het LouseBuster™ apparaat en de fundamentele technologie ervan zijn onderzocht in gecontroleerde, IRB goedgekeurde klinische onderzoeken bij meer dan 500 mensen met hoofdluis, en bij gebruik volgens de instructies bleek het veilig te zijn voor zowel de toepasser als de klant, zonder meldingen over bijwerkingen.

Omdat het apparaat gebruikmaakt van verwarmde lucht, is er echter een kleine kans dat de hoofdhuid verbrandt, als het apparaat niet op de juiste manier wordt gebruikt. Dit risico is geminimaliseerd door talrijke ingebouwde veiligheidsfuncties die ervoor zorgen dat de geleverde lucht constant gehouden wordt op een goed verdraagbare temperatuur, en doordat wij vereisen dat het apparaat alleen wordt gebruikt door LouseBuster Certified Operators™ bij klanten zonder condities die een contra-indicatie vormen voor het gebruik van het apparaat.

Daarnaast wordt er voor elke behandeling een applicatortip voor eenmalige toepassing gebruikt, wat een schoon gebruik garandeert voor de klant.

# LOUSEBUSTER™



## ZEER EFFECTIEF

Hoofdluizen worden razendsnel resistent voor veel traditionele op pesticiden gebaseerde controlemethoden, die de eitjes (neten) nooit doeltreffend hebben kunnen doden en waarvoor doorgaans meerdere behandelingen nodig zijn. Op basis van klinische onderzoeksgegevens doodt of verwijdert het LouseBuster™ apparaat meer dan 95% van de hoofdluizen en eitjes in één behandeling. Over het algemeen is bij mensen die worden behandeld met het LouseBuster™ apparaat 99% van de eitjes dood na de behandeling.

Het type haar en de lengte zijn niet van invloed op de doeltreffendheid, zolang het haar maar kan worden gekamd of doorgeplozen met een gewone kam. Er kunnen dode en levende luizen en eitjes in het haar achterblijven na een behandeling. Om cosmetische redenen en om er voor te zorgen dat alle luizen en eitjes worden verwijderd, raadt Larada Sciences de klanten dus aan om een volledige kambeurt met een fijntandige luizenkam na de behandeling uit te voeren of te laten uitvoeren.

## SNEL

Eén enkele, 30-minuten durende LouseBuster™ behandeling is het enige dat nodig is om hoofdluizen en eitjes te doden.

De schone, droge behandeling maakt alleen gebruik van gecontroleerde verwarmde lucht. Geen water. Geen kleverige toestanden. De LouseBuster™ behandeling kan ter plaatse worden uitgevoerd op het moment dat de plaag ontdekt wordt.

De LouseBuster™ behandeling kan school- of werkverzuim minimaliseren en zelfs uitschakelen, omdat een kind direct na de behandeling weer naar school kan gaan. Controleer het betreffende schoolbeleid.

## PRODUCTBESCHRIJVING

Het LouseBuster™ apparaat is een duurzaam, draagbaar, medisch apparaat. Het meet ongeveer 35 x 48 x 30 cm en weegt minder dan 7,7 kg. Het heeft wielen voor een goede wendbaarheid en is ontwikkeld om tijdens gebruik op de vloer te staan. Een afneembare slang van 2 meter brengt de verwarmde lucht direct vanaf het LouseBuster™ apparaat over naar een wegwerp-applicatortip voor eenmalig gebruik.

Het apparaat werkt op elektriciteit uit een normaal stopcontact (120V/15A; 240V/10A).

Een precisie-thermometer en dubbele sensoren zorgen ervoor dat de temperatuur en de luchtstroomtoevoer van het LouseBuster™ apparaat worden gecontroleerd en nauwkeurig in stand worden gehouden.

## LOUSEBUSTER CERTIFIED OPERATORS™

Het LouseBuster™ apparaat is vrij gemakkelijk te gebruiken, maar er moeten een paar technieken worden geleerd om ervoor te zorgen dat de behandeling zo veilig en effectief mogelijk wordt uitgevoerd. Daarom vereist Larada Sciences dat elke operator van het LouseBuster™ apparaat een gespecialiseerde training krijgt en een vaardigheidstest met succes afrondt, voordat hij/zij het diploma ontvangt om als LouseBuster Certified Operator™ behandelingen uit te mogen voeren.

## BESCHIKBAARHEID

Het LouseBuster™ apparaat wordt alleen verkocht aan professionals voor gebruik in scholen, klinieken en andere plaatsen waar luizen veelvuldig worden vastgesteld of behandeld. Het wordt ook verkocht aan getrainde en gediplomeerde personen die mobiele of salonbehandelingen voor het uytroeven van luizen aanbieden.

De LouseBuster™ technologie is gebaseerd op baanbrekend onderzoek dat is uitgevoerd door de evolutionaire parasitoloog Dr. Dale Clayton en door studenten aan de Universiteit van Utah. Het eerste onderzoek werd in november 2006 gepubliceerd in het vakblad *Pediatrics*, dat hier kan worden bekeken: <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/5/1962> Een tweede publicatie van klinische gegevens wordt in de nabije toekomst verwacht.

**Bel ons vandaag nog +1-877-781-0999 (gratis in de VS en Canada) of neem contact op met uw plaatselijke distributeur. U kunt ons ook online bezoeken op [www.lousebuster.com](http://www.lousebuster.com)**

### Distributor Info:

## LARADA • SCIENCES

Larada Sciences Inc. 350 West 800 North Suite 203 Salt Lake City, UT 84103  
Phone +1 (801) 533-5423 Fax +1 (801) 355-5423 [www.laradasciences.com](http://www.laradasciences.com)

© Copyright 2010 Larada Sciences, Inc. De handelsmerken LouseBuster, LouseBuster Certified Operator en Larada Sciences zijn eigendom van Larada Sciences, Inc.